



endermologie[®] **médical**

Cher(e) client(e),

Toujours soucieux de la réussite de votre pratique, nous sommes heureux de vous proposer cet outil visant à développer votre réseau de prescripteurs au sein du monde médical.

Depuis plus de 30 ans, LPG conduit régulièrement des actions au sein de la communauté scientifique pour prouver et faire reconnaître l'intérêt de ses technologies Cellu M6[®] Alliance Medical et Mobilift M6[®] Physio pour un retour rapide à une meilleure santé. Avec plus de 140 études scientifiques et plus de 200 000 patients traités chaque jour dans le monde, LPG fédère déjà un large réseau de spécialistes de santé.

Nous avons développé pour vous ces fiches visant à expliquer les principaux intérêts thérapeutiques de notre technique endermologie médical selon les différentes spécialités médicales. Nous vous invitons à les communiquer aux médecins et spécialistes de santé de votre entourage afin de faire bénéficier à un maximum de patients des traitements endermologie médical, et ainsi élargir votre patientèle.

À l'aide de votre code client, vous pourrez également télécharger ces fiches en version électronique sur l'extranet LPG (www.lpgsystems.net) et les imprimer ou bien les envoyer par mail.

L'équipe LPG se tient à votre disposition pour répondre à vos questions et vous accompagner dans votre réussite au quotidien.

Christian GAGNIÈRE
Directeur du développement médical & scientifique



FIBROSE

PAR LA MOBILISATION UNIQUE QU'ELLE PROCURE AU TISSU CONJONCTIF, ENDERMOLOGIE MÉDICAL **FAVORISE LA RÉGRESSION DE LA FIBROSE** MÊME SUR LES ZONES DIFFICILES D'ACCÈS. CE TRAITEMENT PERMET **UNE PRISE EN CHARGE PRÉCOCE ET INDOLORE** DES TISSUS, SANS PINCEMENT NI TRACTION INCONTRÔLÉE, CE QUE LA MAIN SEULE NE PEUT RÉALISER.


Les résultats cliniques se manifestent rapidement : amélioration de l'élasticité cutanée, décollement des adhérences, libération des amplitudes articulaires, sédation des éventuelles douleurs, réduction de l'état inflammatoire, amélioration de la circulation sanguine et lymphatique.



TÊTE DE TRAITEMENT
THÉRAPEUTIQUE
ALLIANCE 50


FIBROSE POST-RADIQUE [1]

> Amélioration de la qualité de la peau observée en profilométrie après traitement LPG d'une fibrose post-radique.

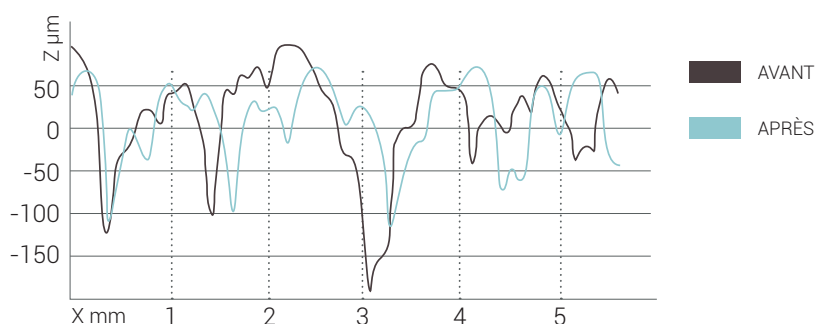


CICATRICE [2]

> Stimulation de la cicatrisation naturelle

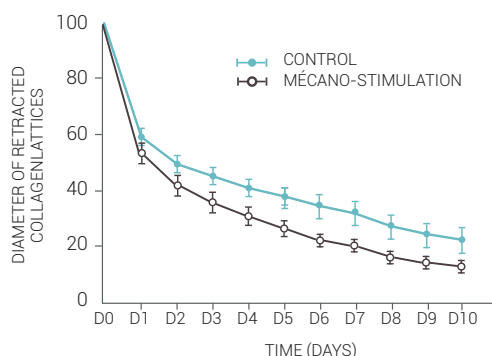

Amélioration des capacités migratoires et de réorganisation matricielle des fibroblastes après traitement LPG®

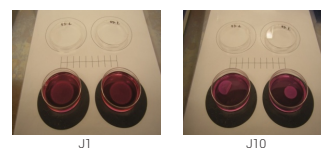

[1] BOURGEOIS J.F. ET AL. : Etude prospective randomisée sur l'utilisation de la Technique LPG dans les fibroses post-radiques : Analyse clinique et profilométrique. Skin Research and Technology 2008: 14: 71-76

[2] HUMBERT P. et al. La Mécano-stimulation de la peau améliore le score de relâchement et induit des modifications fonctionnelles bénéfiques sur le fibroblaste : évaluations cliniques, biologiques et histologiques. Clinical Interventions in Aging 2015 : 10, 1-17.

FIBROSE

CICATRICE HYPERTROPHIQUE



AVANT



APRÈS 34 SÉANCES
(8 MOIS)

Source: Scar Clinic, Afrique du Sud

POST ABLATION CARCINOME



AVANT



APRÈS 9 SÉANCES

Source: Florence Chaparier, MK



TÊTE DE TRAITEMENT
ERGOLIFT


SÉQUELLE DE BRÛLURES [3]

LPG®, PARTENAIRE DES CENTRES DE RÉÉDUCATION DES GRANDS BRÛLÉS.


> Traitement des séquelles de brûlures : constance des données, possibilité de manœuvres délicates, adaptation précise aux problèmes rencontrés (vs autres techniques thérapeutiques)

Centre de Brûlés Montpellier / Lamalou, 2 600 patients traités en 14 ans

SÉQUELLE DE BRÛLURE

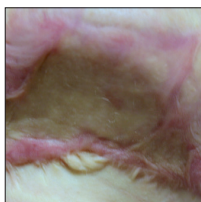


AVANT

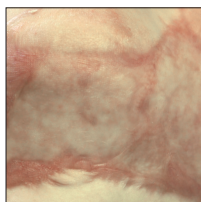

APRÈS 7 SÉANCES
(7 SEMAINES)



Source: Scar Clinic, Afrique du Sud

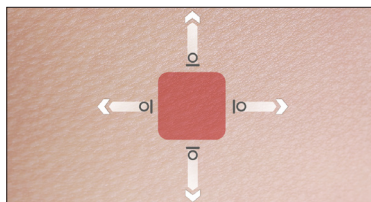

Protocole
de traitement :
Inflammation

SCLÉRODERMIE CIRCONSCRITE [4]

> Amélioration de la qualité de la peau après traitement LPG d'une sclérodémie en plaques (Évaluation clinique)

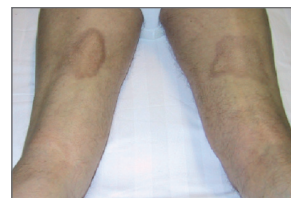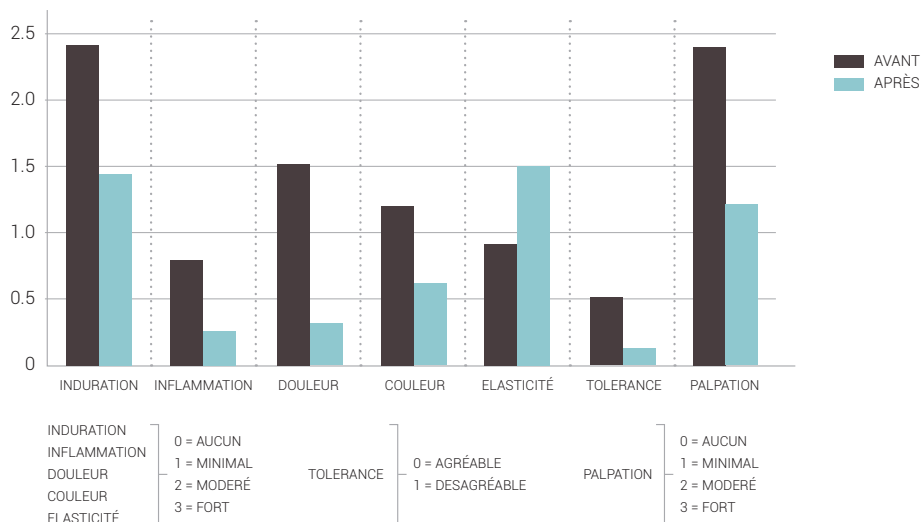

[3] TEOT L. LPG Technique in burn scars : A 14 years experience. 1st National Congress Italian Conference for the study and research on ulcers, wounds and tissular Repair (CO.R.TE); March 1-3, 2006; Rome

[4] WORRET W.I & JESSBERGER B. : Effectiveness of LPG treatment in morphea. J. Eur. Acad. Dermatol. VENEREOL. 2004 Sep;18 (5) :527-30

FIBROSE


LIPODYSTROPHIE [5]

La technique endermologie médical a démontré son efficacité dans le traitement des lipodystrophies consécutives à l'injection d'acétate de glatiramère chez des patients recevant un traitement S.E.P. sur le long terme.

L'évaluation concernait 70 patients S.E.P. (âge moyen 42,7 ans ; 95,7 % de femmes ; durée moyenne de la S.E.P. 9,2 ans ; durée moyenne du traitement avec A.G. 46,7 mois). 50 patients montraient des indurations et 58 patients une lipodystrophie.

Après 12 séances :


- > 30 patients sur 50 ne présentaient plus d'indurations (diminution significative de 42,8 %)
- > Le nombre de ces indurations et le nombre de zone de lipodystrophie ont diminué de manière significative (-13,5 % et -10 % respectivement)
- > L'amélioration esthétique observée sur les photographies était sans équivoque
- > 98 % des patients étaient satisfaits voire très satisfaits du traitement et le considéraient comme très utile
- > 60 % des patients montraient une meilleure tolérance au produit

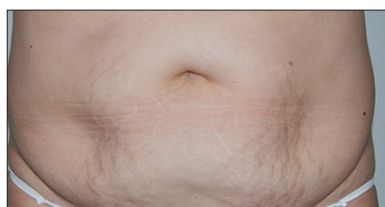

AVANT



APRÈS 12 SÉANCES (6 SEMAINES)

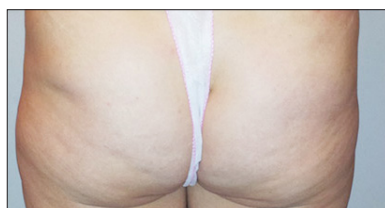


AVANT



APRÈS 12 SÉANCES (6 SEMAINES)



AVANT

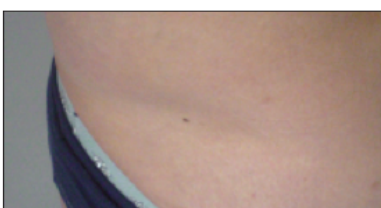

APRÈS 16 SÉANCES [6]



TÊTE DE TRAITEMENT
ALLIANCE 80

[5] MARQUEZ-REBOLLO C et al. Benefit of endermology on indurations and panniculitis/lipoatrophy during relapsing-remitting multiple sclerosis long-term treatment with glatiramer acetate. *Advances in Therapy*. 2014 Aug;31(8):904-14.

[6] MELUZINOVA E. ET AL. Effect of LPG-endermotherapy on skin changes resulting from long-term treatment with glatiramer acetate. *Neurologie pro praxi* 2015 16 (1); 44-47.

SÉNOLOGIE


UNE CHIRURGIE DU CANCER DU SEIN ET/OU UNE RADIOTHÉRAPIE PROVOQUE CHEZ LA PATIENTE DES EFFETS SECONDAIRES AUSSI INVALIDANTS QUE DOULOUREUX : CICATRICES, FIBROSE POST RADIQUE, LYMPHŒDÈME, LIMITATION VOIRE PERTE DE L'AMPLITUDE ARTICULAIRE... LE KINÉSITHÉRAPEUTE TIENT ALORS UNE PLACE PRIMORDIALE DANS L'ACCOMPAGNEMENT DES PATIENTES AUTANT DANS LA RÉÉDUCATION PHYSIQUE QUE DANS LA RÉAPPROPRIATION DE LEUR CORPS.

Grâce à des têtes de traitement spécifiques qui permettent de mobiliser les tissus lésés, endermologie médical **apporte une réponse adaptée quel que soit le type de traitement reçu** (curage axillaire, mastectomie, tumorectomie, reconstruction mammaire...). Chaque protocole favorise l'amélioration de la trophicité cutanée et du processus de cicatrisation, l'assouplissement du tissu cicatriciel, la limitation des adhérences lors de la pose de prothèse, la stimulation de la circulation lymphatique et la récupération fonctionnelle.

Au cours de la rééducation et avec l'aide des traitements LPG, les praticiens observent **une nette amélioration de la qualité de vie de leurs patientes**, élément déterminant dans le processus de guérison.

FIBROSE [1]


> Amélioration de la qualité de la peau observée en profilométrie après traitement LPG d'une fibrose post-radique.

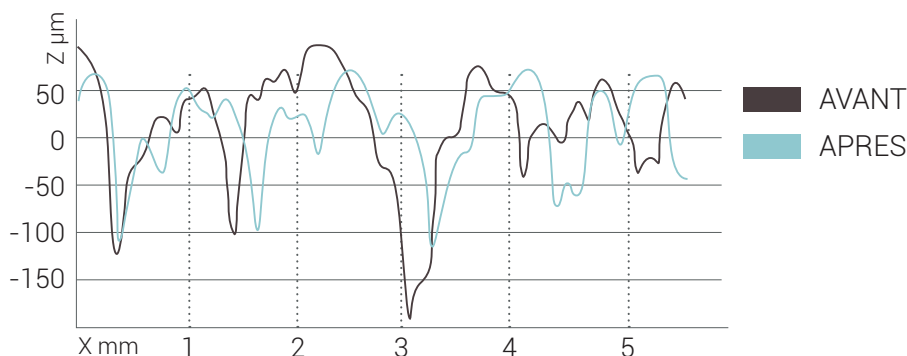

CICATRICE [2]

> Stimulation de la cicatrisation naturelle

Amélioration des capacités migratoires et de réorganisation matricielle des fibroblastes après traitement LPG.

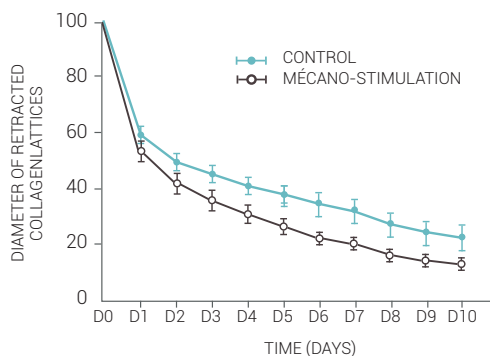


TÊTE DE TRAITEMENT
THÉRAPEUTIQUE
ALLIANCE 50

LPG
medical

[1] BOURGEOIS J.F. ET AL.: Randomized prospective study on the use of LPG Technique in post-radiation fibroses: Clinical and profilometric analysis. Skin Research and Technology 2008; 14: 71-76

[2] HUMBERT P. ET AL.: La Mécano-stimulation de la peau améliore le score de relâchement et induit des modifications fonctionnelles bénéfiques sur le fibroblaste : évaluations cliniques, biologiques et histologiques. Clinical Interventions in Aging 2015; 10, 1-17.

SÉNOLOGIE

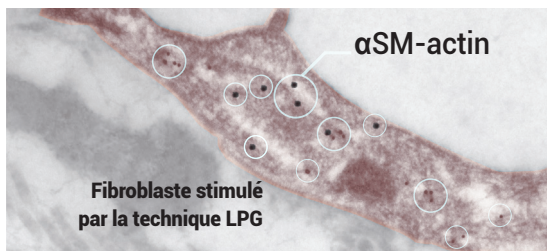


> Activation de la synthèse de α SM-actin mettant en évidence la différenciation des fibroblastes en myofibroblastes après traitement LPG [3]




TÊTE DE TRAITEMENT
ERGOLIFT

POST MAMMECTOMIE

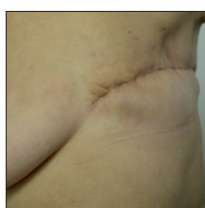

AVANT

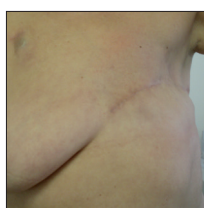

APRÈS 12 SÉANCES
(12 SEMAINES DE
TRAITEMENT)

Source : Jocelyne Rolland, MK

POST TUMORECTOMIE



AVANT



APRÈS 14 SÉANCES
(6 SEMAINES DE TRAITEMENT)

Source : Laurence Vidal, MK

POST RECONSTRUCTION MAMMAIRE IMMÉDIATE. LAMBEAU DU GRAND DORSAL



AVANT



APRÈS 30 SÉANCES
(4 MOIS DE TRAITEMENT)

Source : Laurence Vidal, MK

POST ONCOPLASTIE




AVANT




APRÈS 20 SÉANCES
(4 MOIS DE TRAITEMENT)

Source : Laurence Vidal, MK

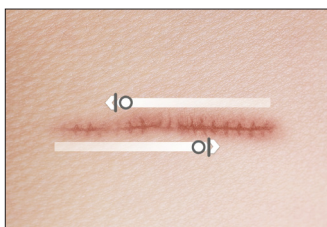

Protocole de traitement :
Cicatrice inflammatoire

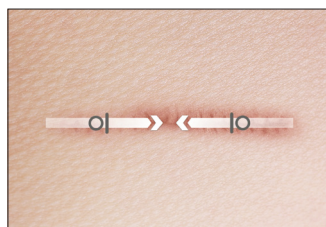

Protocole de traitement :
Cicatrice non-inflammatoire

Dr Bourgeois, chirurgien sénologue, clinique Hartmann (92)

"La kinésithérapie est vraiment essentielle dans la gestion du cancer du sein parce qu'elle va aider la patiente à récupérer des séquelles de nos traitements médicaux, chirurgicaux. La technique LPG va permettre d'augmenter la souplesse cutanée, de réduire les séquelles esthétiques, d'améliorer les cicatrices. Elle permet d'avoir une restitution beaucoup plus rapide et souvent de meilleure qualité."




[3] HUMBERT P. et al. Mécano-Stimulation™ of the skin improves sagging score and induces beneficial functional modification of the fibroblasts: clinical, biological, and histological evaluations. Accepted in "Clinical Interventions in Aging" 2015.

SÉNOLOGIE


LYMPHŒDÈME

> Effet drainant 3x plus rapide que celui obtenu avec un Drainage Lymphatique Manuel [4]

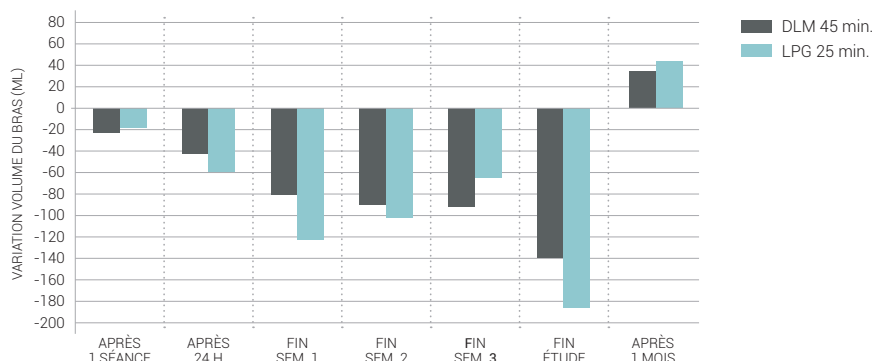

TÊTE DE TRAITEMENT
THÉRAPEUTIQUE
ALLIANCE 50

> Diminution du volume du membre et remodelage de celui-ci [5]

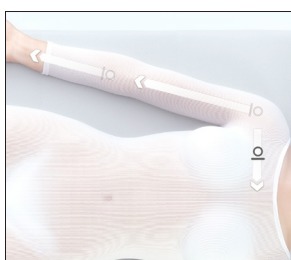

Protocole de traitement :
Lymphœdème



AVANT



APRÈS 20 SÉANCES

« Sur une année, nous avons traité 8 patients atteints de lymphœdèmes post chirurgicaux du bras en post mastectomie. La mesure des circonférences des membres a démontré une réduction de l'œdème tout à fait satisfaisante et même **meilleure à ce que l'on pouvait obtenir avec le drainage lymphatique manuel.**

Pour chaque cas, nous avons obtenu **une réduction de la fibrose** bien supérieure aux espérances avec un remodelage consécutif du membre. La réduction de la fibrose a permis **une récupération de la capacité fléchisseur du membre** aussi bien au niveau du jarret que du coude. La récupération fonctionnelle a toujours été accompagnée d'une **réduction notable de la symptomatologie subjective** (lourdeur, douleur).

Au cours du traitement, nous n'avons constaté aucun incident, la méthode a toujours été bien acceptée, décrite comme **agréable à subir, indolore**. Que ce soit pendant, ou à distance de 3, 6 voir 9 mois, il n'y a eu **aucun épisode de lymphangite** à déplorer chez les patients traités. La technique LPG s'est montrée sans aucun doute supérieure au drainage lymphatique manuel pour la réduction des fibroses, le remodelage du membre et la récupération fonctionnelle. Sur l'œdème, on obtient des résultats superposables en tout. »

[4] MOSELEY A.I ET AL. Comparaison de l'efficacité du Drainage Lymphatique Manuel et de la Techniques LPG dans le traitement du lymphœdème. Journal of Lymphoedema 2007, Vol 2, N°2, 30-36

[5] RUFINI E. : 4^{ème} Congrès National du Collège Italien de Phlébologie ; 13-14 octobre 2000, Ferrara, Italie.

RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE


■ ORTHOPÉDIE ■ GÉRIATRIE ■ TRAUMATOLOGIE

ENDERMOLOGIE MÉDICAL EST EFFICACE SUR LE **TRAITEMENT DES PATHOLOGIES DE L'APPAREIL OSTEO MUSCULAIRE** PERMETTANT UNE MOBILISATION INFRA-DOULOUREUSE, RAPIDE ET PRÉCOCE.


PATHOLOGIES MUSCULAIRES ^[1]

endermologie médical permet un traitement précoce et infra-douloureux pour assouplir les rétractations musculaires, accélérer la cicatrisation, drainer en profondeur.

> **Limitation de la formation de l'œdème après exercice physique intense**

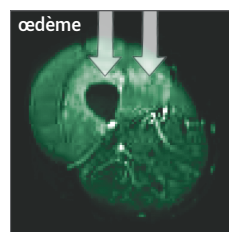

CÔTÉ NON TRAITÉ

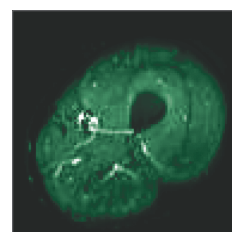


CÔTÉ TRAITÉ

RAIDEURS ARTICULAIRES

endermologie médical libère sans douleur les plans de glissement aponévrotiques visant à réorganiser le tissu conjonctif, relâcher les contractures musculaires et ainsi libérer les mobilités articulaires. Elle accélère la cicatrisation et prévient la fibrose anarchique.


Protocole de traitement :
Fibrose

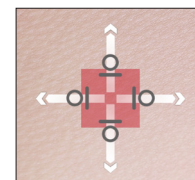

PATHOLOGIES DES TENDONS ET LIGAMENTS

endermologie médical permet l'étirement et la mobilisation des plans de glissement peau / tendons / etc.

Protocole de traitement :
Tension musculaire

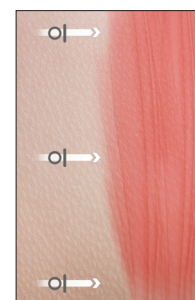



[1] PORTERO P., VERNET J.M. : Effets de la technique LPG sur la récupération de la fonction musculaire après exercice physique intense
Ann. Kinésithér. 2001, t.28, n°4, pp 145-151

INSUFFISANCE VEINEUSE

ENDERMOLOGIE MEDICAL PERMET **DE MOBILISER LES TISSUS ET D'ACCÉLÉRER LE DÉBIT VEINEUX** POUR UN SOULAGEMENT IMMÉDIAT ET DURABLE.

ACTIVATION DU FLUX VEINEUX X4 ^[1]


> Echo Doppler

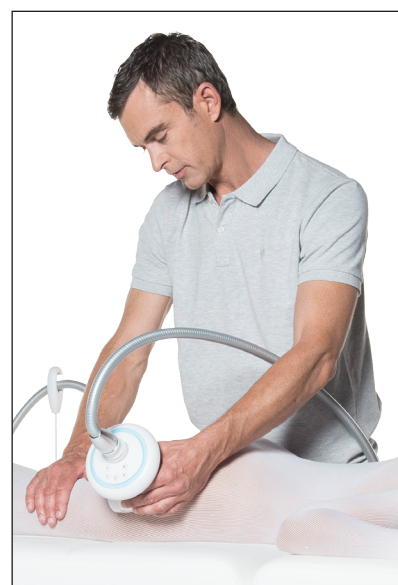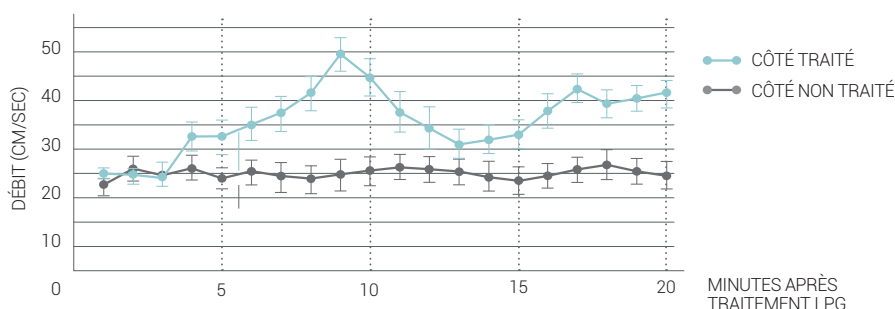

COMPARAISON LPG ET VEINOTONIQUE ^[2]

> Perfusion sanguine presque triplée après une séance LPG (x2.89) : Effet supérieur à celui d'un veinotonique (x1,86) et effet combinatoire des 2 méthodes(x3.3).

Unités de Perfusion (Laser Doppler)

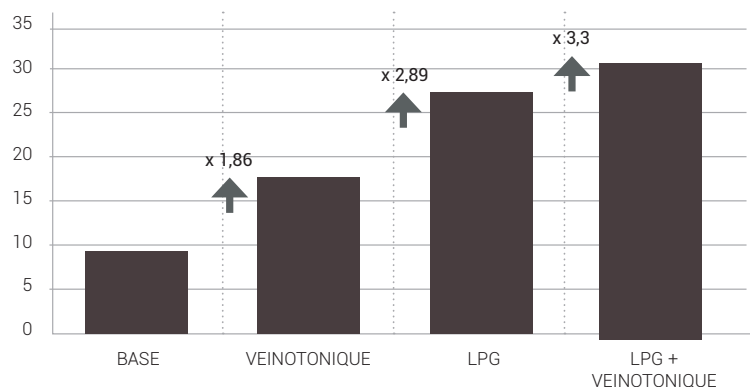

[1] WATSON J. ET AL. Effets physiologiques de l'Endermologie®: Étude préliminaire Aesthetic Surg J 1999, 19 (1);27-33.

[2] LATTARULO P., BACCI P.A., MANCINI S. Physiological tissue changes after administration of micronized Diosmin/Hesperidin, individually or in association with Endermologie®. International Journal of Aesthetic Cosmetic Beauty Surgery 2001 Vol. 1, n°2, p. 25-28.

INSUFFISANCE VEINEUSE

TRAITEMENT D'UNE HYPODERMITE CHRONIQUE [3]


> Photoplethysmographie : amélioration de la stase veineuse

	AVANT TRAITEMENT LPG	APRÈS TRAITEMENT LPG	P
TEMPS DE DEMI REMPLISSAGE (SEC.)	6,8 ± 1	12,5 ± 0,9	< 0,001
TEMPS DE REMPLISSAGE COMPLET (SEC.)	17 ± 1,2	26 ± 2,5	< 0,001


ACTIVATION DE LA MICROCIRCULATION CUTANÉE

> Micro-angioscopie : amélioration de la microcirculation cutanée

P. BLANCHEMAISON - Paris

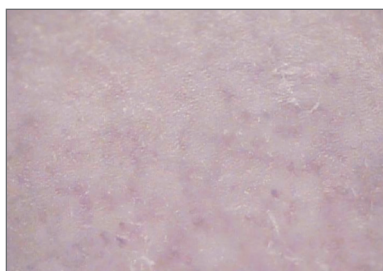

AVANT TRAITEMENT LPG

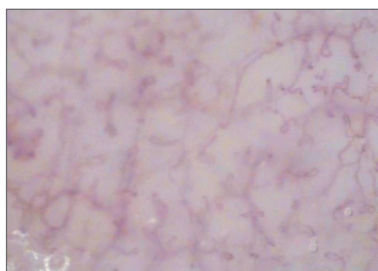

APRÈS 10 MINUTES DE TRAITEMENT LPG



Protocole de traitement : Insuffisance veineuse



TÊTE DE TRAITEMENT ALLIANCE 80


PRÉ/POST CHIRURGIE ESTHÉTIQUE

COMBINÉES AUX PROTOCOLES D'ESTHÉTIQUE MÉDICALE, ENDERMOLOGIE® MÉDICAL PERMET, DE MANIÈRE 100 % NATURELLE, NON-INVASIVE ET NON-AGRESSIVE, DE **RÉDUIRE CONSIDÉRABLEMENT LES SUITES OPÉRATOIRES** GRÂCE À UN TRAITEMENT PRÉ ET POST-INTERVENTION ET **D'OPTIMISER LES RÉSULTATS DANS LE TEMPS.**

DRAINER LES ŒDÈMES [1]

endermologie médical permet un drainage précis et régulier, sans douleur pour des résultats plus visibles et plus rapides qu'un drainage manuel. Elle permet de drainer les liquides résiduels et de résorber les ecchymoses, de soulager la douleur et de prévenir la fibrose.

> Activation prolongée du flux veineux x4 (Echo Doppler)

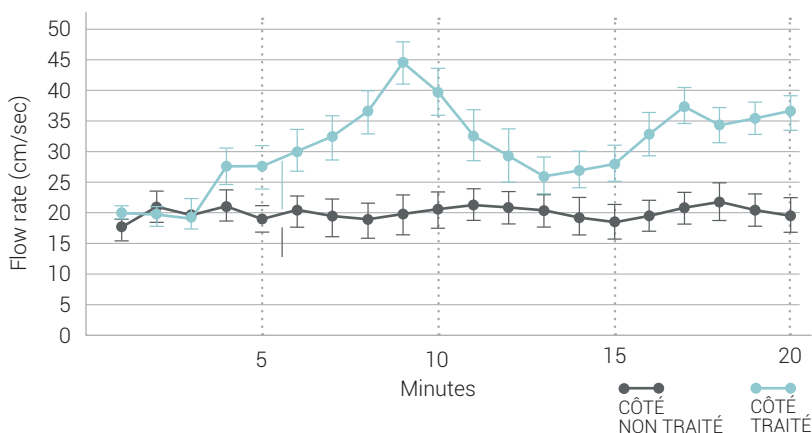


POST-LIPOSUCCION



POST INTERVENTION JOUR 1



> Activation du flux lymphatique x3 (Lymphoscintigraphie)

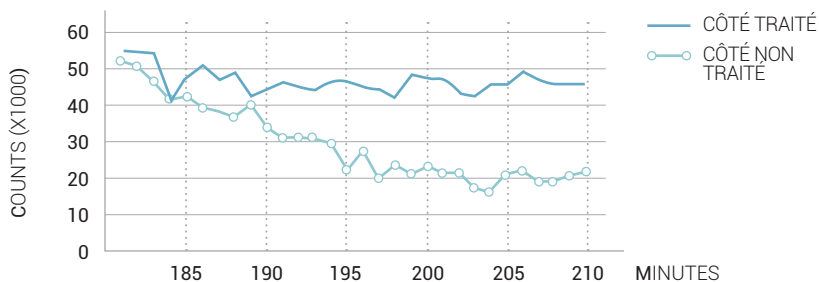


AVEC TRAITEMENT LPG EN PRÉ-OPÉRATOIRE : SANS TRAITEMENT LPG EN PRÉ-OPÉRATOIRE

PRÉ/POST CHIRURGIE ESTHÉTIQUE

TRAITER LA FIBROSE CICATRICIELLE

La technique endermologie® médical permet une saisie tissulaire unique même sur des zones difficiles d'accès, sans traumatisme ni douleur, pour libérer rapidement les adhérences, relancer les échanges. Les cicatrices sont moins visibles et la gêne fonctionnelle considérablement réduite.

POST-ABDOMINOPLASTIE

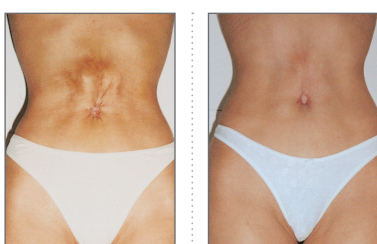

AVANT

APRÈS 22 SÉANCES

POST-RECONSTRUCTION MAMMAIRE




AVANT

APRÈS 30 SÉANCES

Source : P. Magdinier, MK

POST LIFTING DU BRAS

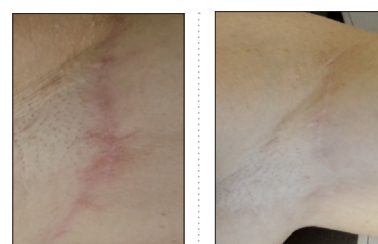

AVANT

APRÈS 20 SÉANCES


Source : Florence Charpentier, MK

LISSER LES IRRÉGULARITÉS DE SURFACE [2]


endermologie médical permet d'améliorer la qualité tissulaire en réactivant naturellement le système veino-lymphatique ainsi que la synthèse de collagène et d'élastine. Les tissus sont plus souples et plus élastiques, pour de meilleures conditions d'intervention et pour un résultat optimisé.

« La Technique LPG peut être associée à la chirurgie plastique dont elle optimisera l'efficacité et la tolérance, **en aidant à préparer les tissus avant l'intervention, en réduisant la fréquence et l'intensité des effets secondaires** (oedèmes, ecchymoses, irrégularités de surface) des suites opératoires immédiates, en diminuant la convalescence post opératoire à distance, avec **optimisation de la cicatrisation et de la trophicité des tissus.** »

POST-LIPOSUCCION

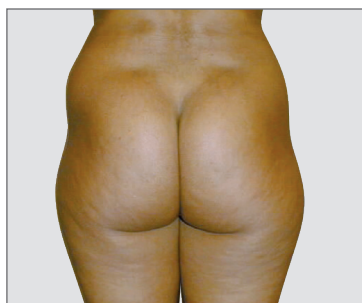

AVANT

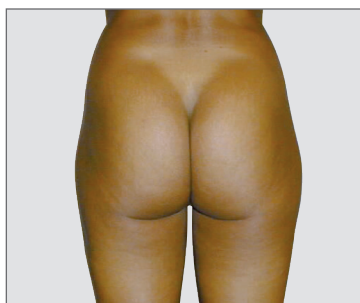

APRÈS 10 SÉANCES

Source : Dr. Blairvacq, Liège



TÊTE DE TRAITEMENT
THÉRAPEUTIQUE ALLIANCE 50


RACHIS

- LOMBALGIE ■ DORSALGIE ■ CERVICALGIE
- POST-CHIRURGIE HERNIE DISCALE


ENDERMOLOGIE MEDICAL PERMET **UN TRAVAIL PRÉCOCE, RAPIDE ET ANTALGIQUE** DES PLANS TISSULAIRES POUR **LEVER LES TENSIONS ET RETROUVER DE LA MOBILITÉ.**

PATHOLOGIES MUSCULAIRES

endermologie médical sollicite plus facilement les tissus et les muscles pour assouplir les rétractations musculaires, prévenir la fibrose et résorber les oedèmes en drainant en profondeur.

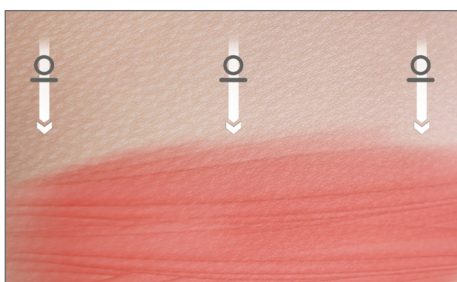

Protocole de traitement :
Tension musculaire

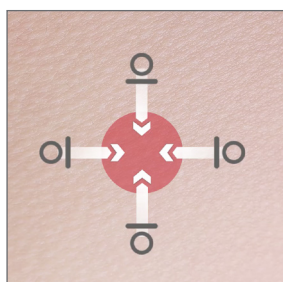

Protocole de traitement :
Douleur



TÊTE DE TRAITEMENT
THÉRAPEUTIQUE **ALLIANCE 50**

RAIDEURS ARTICULAIRES

endermologie médical libère sans douleur les plans de glissement aponévrotiques visant à réorganiser le tissu conjonctif, relâcher les contractures musculaires et ainsi libérer les mobilités articulaires. Elle accélère la cicatrisation et prévient la fibrose anarchique.



POST PARTUM


■ SILHOUETTE ■ CELLULITE ■ RELÂCHEMENT CUTANÉ ■ CICATRICE

DÈS LE RETOUR DE COUCHES, ENDERMOLOGIE MÉDICAL PERMET DE **TRAITER LES SURCHARGES GRAISSEUSES** LOCALISÉES, LE RELÂCHEMENT CUTANÉ ET LA CELLULITE POUR RAPIDEMENT **RETROUVER UNE SILHOUETTE HARMONIEUSE**. LES CICATRICES DE CÉSARIENNE PEUVENT ÉGALEMENT ÊTRE RAPIDEMENT AMÉLIORÉES.

DÉSTOCKER LES GRAISSES RÉSISTANTES

endermologie® médical travaille délicatement les tissus en surface pour stimuler le décroissement conjonctif (mobilisation des septas), la circulation veineuse et lymphatique et le déstockage des adipocytes (lipolyse).

+ 70% d'élimination des graisses ^[1]

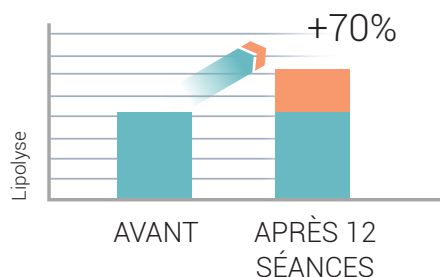


Source : Florence Charpentier, MK

-3,4 cm de tour de taille après 3 séances ^[2]

TRAITER LE RELÂCHEMENT CUTANÉ


endermologie médical stimule l'activité fibroblastique pour redensifier le derme et traiter le relâchement cutané.

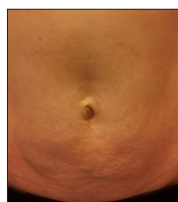

Source : Finlande

TRAITER LA FIBROSE CICATRICIELLE

endermologie médical permet par son action défibrosante de traiter les éventuelles cicatrices de césarienne (inflammatoires ou non-inflammatoires) pour une prise en charge précoce et indolore des tissus, sans pincement ni traction incontrôlée, ce que la main seule ne peut réaliser.

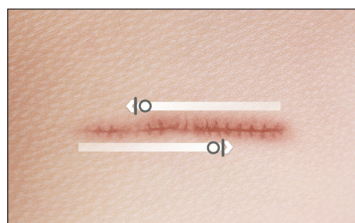

TÊTE DE TRAITEMENT
ALLIANCE 80

[1] LAFONTAN M. ET AL. Impact of Mechanical massage on gene expression and lipid mobilization in female gluteofemoral adipose tissue. Obesity Facts. 2011 ; 4(2) : 121-9 ; 2016
[2] ÉTUDE DERMSCAN. 2016

FIBROMYALGIE

LE PRINCIPAL SYMPTÔME DE LA FIBROMYALGIE EST UNE DOULEUR INTENSE ET DIFFUSE, LOCALISÉE SUR 18 POINTS GÂCHETTES (COU, ÉPAULES, DOS...). SOUVENT ASSOCIÉE À D'AUTRES SIGNES TELS QUE L'ANXIÉTÉ, L'INSOMNIE ET LA FATIGUE MUSCULAIRE, CETTE MALADIE EST TRÈS INVALIDANTE ET LE TRAITEMENT HABITUEL CONSISTE PRINCIPALEMENT À LA PRISE D'ANTI-INFLAMMATOIRES ET D'ANTIDÉPRESSEURS.



TÊTE DE TRAITEMENT
ALLIANCE 80

endermologie® médical mobilise de **manière indolore** les plans tissulaires pour **soulager les tensions musculaires** liées à la fibromyalgie. Cette technique contribue ainsi nettement à l'amélioration de la qualité de vie des patients.

Une étude pilote réalisée par le **Dr. Gordon^[1]**, spécialiste en thérapie physique et réhabilitation, a démontré l'intérêt de la technique endermologie médical dans le traitement de cette pathologie.

Dix patientes fibromyalgiques, âge moyen 46.8 ans, ont reçu une séance endermologie de 35mn par semaine pendant 15 semaines.

À v15 et par comparaison à v0, le score fonctionnel du FIQ (Fibromyalgie Impact Questionnaire) est significativement amélioré de **60%** (Fig. 1) et toutes les EVA (Echelle Evaluation Visuelle allant 0/10) sont significativement diminuées de **50%** (Fig. 2).

Par ailleurs, l'examen clinique retrouve un **nombre moyen de points douloureux également significativement diminué de 50 % et un score de douleur amélioré de 60 %** (Fig. 3).

Enfin, en ce qui concerne l'acceptabilité, **67 % des patients trouvent le traitement endermologie médical relaxant, 89 % considèrent qu'il leur a apporté une aide, et 89 % veulent continuer les séances.**

FIG 1 : Évolution du score fonctionnel SELON FIQ

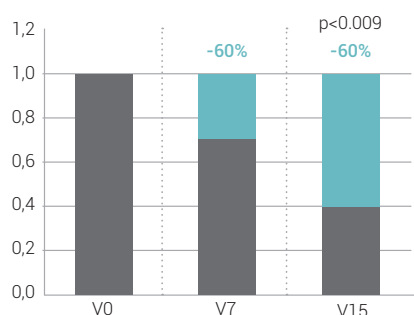


FIG 2 : Échelle visuelle analogique selon FIQ


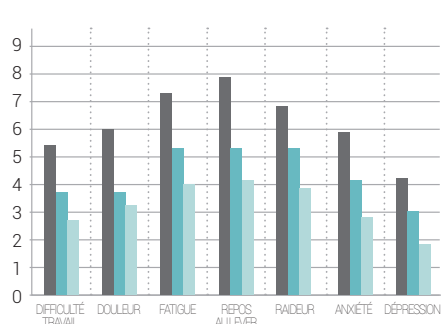


FIG 3 : Score de douleur selon examen clinique

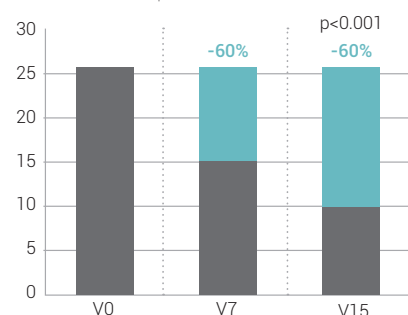

Protocole de traitement : **Fibromyalgie**